

Perfit FS

vatech



Первый в мире полностью
спеченный циркониевый блок



Perfit FS

Абсолютная натуральность

Бесшовная 3х слойная структура

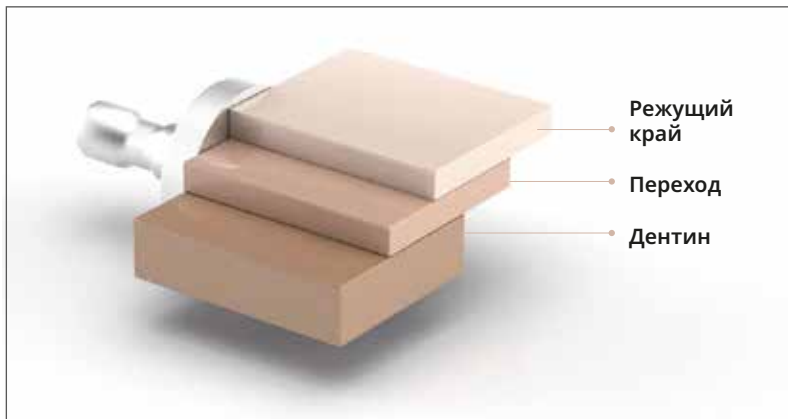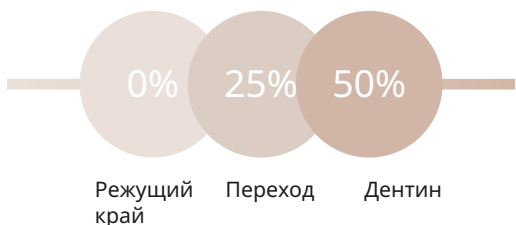


Быстрый рабочий процесс

Экономьте время, обжиг не требуется




Интраоральное сканирование

»

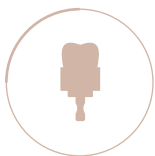

Дизайн

»

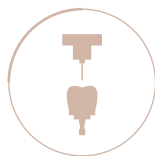

Фрезерование

»



Глазурирование


Высокий уровень трещиностойкости

Твердость по методу Виккерса при нагрузке 10 кг

Perfit FS обладает повышенной трещиностойкостью по сравнению с обычным циркониевым диском (3Y-TZP) и стеклокерамикой



Perfit FS

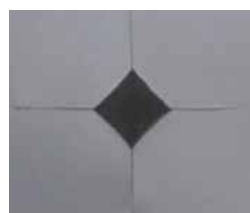

3Y-TZP



Стеклокерамика

500 МПа, Высокая прочность на изгиб

Широкий спектр показаний



Inlay/Onlay



винир



одиночная коронка
(Anterior)



одиночная коронка
(Posterior)



coping



мост из 3 единиц

Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)

Q Perfit FS сделан из циркония?

A Да. Этот продукт сделан на 100% из циркония.


Q Требуется ли для блока Perfit FS процесс обжига?

A Обжиг не требуется, поскольку блок Perfit FS представляет собой полностью кристаллизованный (спеченный) блок.

Q Сколько размеров доступно?

A Perfit FS выпускается в 4 размерах. Размеры блока приведены ниже.

- I12 (15.0 X 12.0 X 10.4)
- C14 (18.0 X 14.0 X 12.7)
- C16 (18.0 X 15.9 X 17.8)
- B32 (32.0 X 15.1 X 15.1)

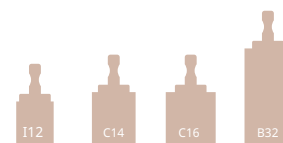

Q Какие фрезерные станки совместимы с Perfit FS?

A 4-осевой или 5-осевой фрезерный станок влажного типа, который может фрезеровать стеклокерамические блоки.

*Перед использованием Perfit FS проверьте совместимость с вашей CAM системой.

Q Доступные фрезерные станки

Фрезерный станок	S/W	срок службы инструмента
Imes-icore -CORITEC One/One+ -CORITEC 150i pro	Millbox hyperDENT	Более 20 единиц (Perfit Customized Bur)
Dentsply Sirona -CEREC MC X -CEREC MC XL -CEREC Primemill -inLab MC XL	inLab S/W Cerec SW	25 Блоков (Pointed Bur) 12 блоков (Step Bur)
Roland DG -DXW-42W	MillBox	Более 20 единиц (Perfit Customized Bur)

Q Можно ли окрашивать Perfit FS?

A Perfit FS может быть окрашен и глазирован материалами различных производителей.

Q Можно ли отполировать поверхность Perfit FS?

A Глянцевая полировка не рекомендуется, так как она может снизить прочность и эстетичность по сравнению с глазированием.

